




Enveloppe hygiénique® Protège cuvette

Description pour appel d'offres

Enveloppe hygiénique pour cuvette de toilette avec tampon super absorbant
Capacité d'absorption : 600 ml
Dimensions de l'enveloppe : 25,2" x 15" – 64 x 38 cm
Sans date de péremption
Produit écoresponsable
Fabrication canadienne 

Code produit

Caisse : SA-HYGI-PCWC-000

Présentation

Enveloppe hygiénique® - protège cuvette contenant un tampon super absorbant qui permet de gélifier les liquides biologiques et de réduire les odeurs. Elle permet de transformer une toilette traditionnelle en toilette sèche, ne nécessitant pas de chasse d'eau. Protège tous les types de cuvettes et de seaux.

Dimensions enveloppe

Longueur = 25,2" - (64 cm). Largeur = 15" - (38 cm). Épaisseur = 38µm.

Composition

Sac en polyéthylène muni de liens. Tampon super absorbant 100% recyclé composé d'un support non tissé à base de sulfate couplé à des copolymères d'acrylate de sodium. Sans latex et sans phtalates.

Durée de vie

Aucune date de péremption.

Efficacité

Absorption de 600 ml de liquide en moins de 30 secondes.

Procédé de fabrication

Thermo soudage avec insertion de liens coulissants.

Destination

Recommandé pour disposer des urines et des selles contaminées par des biocides ou des substances radioactives ou chimiothérapeutiques. Idéal dans les cas où une collecte d'échantillons est requise pour analyse ou tout simplement en cas de pénurie d'eau.

Mode d'emploi

1. Ouvrir le paquet et en extraire le rouleau d'enveloppes
2. Dérouler la 1^{ère} enveloppe et la détacher selon la prédécoupe
3. Ouvrir l'enveloppe et contrôler la présence du tampon absorbant au fond de l'enveloppe
4. Relever la lunette des toilettes
5. Installer l'enveloppe sur la cuvette des toilettes et rabattre la lunette
6. Faire les besoins dans l'enveloppe
7. Attendre quelques instants que les liquides se gélifient (600 ml en quelques secondes)
8. Fermer l'enveloppe, nouer et disposer à l'endroit approprié

Se référer à la notice d'utilisation pour plus de détails.

Précautions d'emploi

Produit à usage unique. Ne pas réutiliser après emploi. Ne pas laisser à la portée des enfants.

Élimination

Éliminer dans les déchets réguliers ou selon le protocole de l'établissement. Ne pas jeter dans les toilettes.

Avantages

Offre une protection pour tous types de cuvettes et de seaux. Limite la propagation des pathogènes. Améliore l'hygiène, économise le temps, réduit les odeurs, s'élimine facilement et sans risque. Produit à usage unique.

Identification

Chaque produit est identifié par un numéro de lot.

Qualité

Nos sacs sont testés selon la méthodologie et les critères d'acceptation de la norme NF-X30-501 : *Emballages des déchets d'activités de soins – Sacs pour déchets d'activités de soins mous à risque infectieux – Spécifications et méthodes d'essais.*

Réglementation

FDA : dispositif médical de class I exempté de 501(k).

Marquage CE : Ce produit appartient à la classe I selon les règles de l'annexe IX de la directive européenne 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux.

Risques/sécurité

Risque très léger d'irritation oculaire ou des voies respiratoires en cas de contact prolongé avec le tampon super absorbant. La fiche signalétique est disponible sur demande.

Manutention/Stockage

Conservé au propre, à l'abri du soleil et de l'humidité.

Conditionnement

Unité	Sachet de 18 enveloppes hygiéniques® protège cuvette	17,8 x 12,7 cm / 0,68 kg 7 x 5 in / 1,5 lbs
Caisse	20 rouleaux de 18 enveloppes (360)	60 x 27 x 42 cm / 18,7 kg 23,5 x 10,75 x 23,5 inches / 41,2 lbs
Palette	20 caisses par palette soit 400 rouleaux de 18 enveloppes	126 x 102 x 121 cm / 396 kg 49,5 x 40 x 47,75 inches / 874 lbs